



# Käyttöohje

## Annostelijapullon käyttö:

1. Aseta pullo vakaalle alustalle ja pidä sitä lujassa otteessa. Irrota muovikansi.
2. Paina sinistä rengasta lujaa mutta varovasti alas noin 2 sekunnin ajan. Annostelijan valkoinen osa liikkuu hitaasti ylöspäin.
3. Kun näet renkaan valkoisen osan ympärillä, lopetat painamisen. Annostelija on nyt täynnä ja valmiina käytettäväksi. Nosta sinivalkoinen osa ulos annostelijan pidikkeestä.
4. Kun näet renkaan valkoisen osan ympärillä, lopetat painamisen. Annostelija on nyt täynnä ja valmiina käytettäväksi. Nosta sinivalkoinen osa ulos annostelijan pidikkeestä.
5. Pura annostelija osiin ja huuhto osat lämpimässä virtaavassa vedessä. Geeli on öljytöntä ja siksi helppoa huuhtoa. Aseta annostelija takaisin pulloon.

Annostelijapullo on hyvä vaihtoehto silloin, kun tarkoituksena on ehkäistä peräpukamien syntyä, sillä annostelija kuljettaa geelin muutaman senttimetrin peräsuolen sisään.

Ponnistamisen tarve WC-käynnin aikana on yksi syy peräpukamien ilmentymiseen, mutta Ac3 COMFORT® voitelee anaalikanavan ja vähentää riskiä ongelman syntymiseen.

[Tästä painamalla saat tulostettavan version yllä olevasta ohjeesta \(pdf\)](#)



### Osta Ac3 Comfort!

AC3 on saatavilla kätevästi suoraan verkkokaupasta tai lähimmästä apteekista. Älä anna peräaukon kutinan, ärsytyksen tai kirvelyn turhaan häiritä elämääsi - hanki nopea helpotus.